

# DuoPlus - Fikseret mitella

ART.NO 20113

Fikseret mitella DuoPlus er en todelt immobiliseringsortose, som aflaster skulderleddet med formindsket belastning af nakken. To bånd, der krydses over ryggen, fordeler vægten over begge skuldre. Et løst bredt bånd kan fikse armen mod mellemgulvet. Alle bånd lukkes med velcro. Lommens og båndenes inderside er af frottémateriale. Passer både til venstre og højre arm

**Indikationer:** For aflastning/immobilisering/fiksring af skulder/arm. Ved traume, akut eller postoperativ behandling. **Kontraindikationer:** For patienter med sinus caroticus syndrom bør tryk fra ortosen i sinus carotis-området undgås.


**Materiale:** Nylon 40%, Polyester 25%, Polyuretanskum 20%, Bomuld 15%. Latexfri.

**Vaskeanvisning:** Maskinvask 40°C. Luk alle velcrobånd inden vask. Benyt vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Produktet må ikke, renses, stryges eller komme i tørretumbler.

## Måltagning:

- 1. Længde underarm:** Albue til fingerspids i cm.
- 2. Torso + overarm:** Mål rundt om den formodede placering omkring torso og den ene arm.

Størrelse	1. Længde underarm cm	2. Torso + overarm cm	Art.no
S	35-40	60-80	20113-06-40
M	39-44	80-95	20113-06-50
L	43-48	95-115	20113-06-60
XL	47-54	115-145	20113-06-70

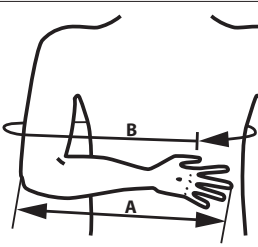


MD Class I CE