

DuoTrain - Fikseret mitella

ART.NO 20119

Fikseret mitella DuoTrain giver komfortabel støtte og aflastning ved smerterelaterede skulderproblemer. Ekstra stærke velcrolukninger, slitage plader, tillader DuoTrains låsemekanismer at blive åbnet og lukket mange gange, derfor anbefales fixeret mitella især i forbindelse med træning. Skulderstropper er justerbare lodret og vandret langs selve mitella og fastgøres med velcro. Justerbart immobiliseringsbånd rundt om kroppen. Slingens og skulderstroppens inderside er i frottémateriale. Passer til både højre og venstre arm.

Indikationer: For aflastning/immobilisering/fiksering af skulder/arm. Ved traume, akut eller postoperativ behandling. **Kontraindikationer:** For patienter med sinus caroticus syndrom bør tryk fra ortosen i sinus carotis-området undgås.

Materiale: 42% Nylon, 23% Polyuretanskum, 21% Polyester, 14% Bomuld. Latexfri..

Vaskeanvisning: Maskinvask 40°C. Luk alle velcrobånd inden vask. Benyt vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Produktet må ikke, renses, stryges eller komme i tørretumbler

Mål: Albue til fingerspidser i cm.

Størrelse	Længde underarm cm	Art.no
Small	35-41	20119-06-40
Medium	40-44	20119-06-50
Large	43-49	20119-06-60
X Large	48-55	20119-06-70

Størrelse:

Small passer til børn / meget lille voksen.

Medium passer lille voksen

Large passer til voksen.

X Large passer høj / stor voksen.



1. Fastgør slitage plader i ønskede position.

2. Immobiliseringsbåndet kan enkelt justeres i længden med D-rings lukningen.



MD Class I CE