

# E-motion - Albueortose

ART.NO 20206

E-motion bruges til postoperativ eller posttraumatisk stabilisering af arm og albue for at give et kontrolleret bevægelsesområde eller immobilisering. Teleskopmekanisme for nem justering af længden. Aluminiumsmanchetterne omkring over- og underarme kan formes individuelt, så risikoen for at glide mindskes. Ortoesen kan nemt tages på og af med én hånd med trykknapperne.

Ekstension kan justeres og fikseres fra 0°- 90° og flexion fra 0° - 120°. Indstillingen sker i intervaller på 10°. Indstillingen er sikret med kabelbindere.

**Indikationer:** • Efter operationen

- Kontrol af flexion-ekstension
- Kontrol af pronation/supination
- Konservative behandlinger
- Post-gipsafstøbning.

**Kontraindikation:** Undgå at placere manchetten direkte på skadet eller hævet del.

**Materiale:** Skinn: 40% Aluminium, 35% Polyamid, 15% Stål, 10% Polyester.

Polstring: 50% Polyuretan, 38% Nylon, 10% Elastan, 2% Syntetisk Karbonfiber. Latexfri.

**Vaskeanvisninger:** Tekstilbeklædning – vask 30°C grader. Den bedste holdbarhed opnås ved at håndvaske og lufttørre tekstilet. Skinnerne og leddet – vaskes med en klud og varmt vand/mildt desinfektionsmiddel.

**Tilbehør:** Justerbar og aftagelig håndstøtte til pronationsupination inkluderet.

Størrelse	Side	Art.no
Universal	Venstre	20206-10-50
Universal	Højre	20206-20-50



MD Class I CE