

CubitiComfort - Frakturortose

ART.NO 20222

CubitiComfort er en komfortabel og sikker helarms-ortose for rehabilitering og/eller fakturbehandling efter Samiento-princippet. Ortosen kan individuelt tilpasses og har meget høj patient komfort. CubitiComfort lindrer smerter og tillader bevægelse i skulder og albueled, hvilket reducerer risikoen for ledstivhed og muskelatrofi i behandlings perioden. Justerbar bevægelighed for fleksion/extension af albueledet med 15° interval. Kan låses i ønskede leje. Ortosen har brede cirkulære bånd som sammen med formstøbte plader, danner en cylindrisk form (X & Y), giver ensartet kompression og jævn aflastning. Ortosen sidder komfortabelt og sikkert på plads. Ortosens længde kan justeres trinløst. Findes i fire forskellige størrelser som passer både højre og venstre arm.

Indikationer: Diaphyseal fraktur af humerus. Brud nær ved albue. Ledbåndsskader i albuen.

Kontraindikationer: Massiv skade på blødt væv. Manglende efterlevelse af retningslinjer. Uacceptabel stilling af fraktur.

Materiale: Ventilierende tekstil distancemateriale der føles køligt mod huden og tillader huden at ånde.

Polyester 59%, Polyamid 37%, Bomuld 2%, Elastane 1%, Polyuretan 1%. Latexfri. Led af aluminium.

Vaskeråd: Tag leddet ud ved vask. Den tekstile del af ortosen kan maskinvaskes ved 40°C. Luk alle velcrobånd før vask. Brug gerne en vaskepose. Leddet aftørres med en blød, fugtig klud eller sprittes af.

Måltagning: Omkredsen målt rundt om overarmen og underarmen proksimalt. Den totale længde på ortosen kan justeres trinløst.


Ekstra stivere art. nr. 20221:

Bestilles særskilt. Pakke med 4 stivere, str. S – XL.

For bedre stabilitet og kompression ved større arm omkreds: 1 eller 2 stivere sættes ind i sidelommerne.



Reg. design by OHIM: 001951500-0001

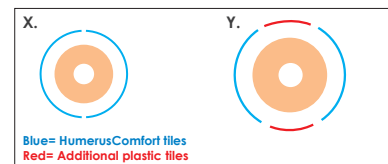

Om nødvendigt påføres ekstra stivere for at opretholde cirkulær kompression for stærkere arme.

	A. Omkreds overarm (cm)	B. Omkreds underarm	C. Ortosens længde overarm	D. Ortosens længde underarm	E. Ortosens totale længde	Art.no
S	14-23	18-26	26,5	17	46-54	20222-09-40
M	23-32	23-32	28,5	19	50-58	20222-09-50
L	30-39	28-38	30,5	20	52-60	20222-09-60
XL	38-50	28-38	30,5	20	52-60	20222-09-70

