

HumerusComfort Extend - Frakturortose

ART.NO 20224

HumerusComfort Extend er en stabil frakturortose designet og udviklet efter de biomekaniske krav, som Sarmiento-princippet opfylder til at kontrollere humerus-segmenter ved kompression af blødt væv. Lindrer smerte og giver bevægelsesfrihed i både skulder- og albueled. Dermed mindskes risikoen for stive led og muskelatrofi i behandlingstiden. Ortosen er komfortabel og tryk og har brede bånd samt støbte plader til glat kompression som omslutter skulderleddet. Den tekstile skulderdel gør, at ortosen sidder bekvemt og sikkert på plads. De integrerede formstøbte plader, danner en cylindrisk form, kan let tages ud og forkortes eller omformes. Tekstilet luftspalter bidrager til trykfordeling. Passer både til højre og venstre arm. Produktet er røntgenpermeabel.

Indikationer: Ikke operativ behandling af lukkede skaff frakturer på humerus. Ikke operativ behandling af stabile proximale humerus-frakturer. Postoperativ behandling af åbne skaff frakturer på humerus. Efter intern/ekstern fixation.
Kontraindikationer: massiv skade på blødt væv, manglende efterlevelse af retningslinjer, uacceptabel stilling af fraktur.


Materiale: Ventilrende tekstilt distansmateriale der føles køligt på huden og tillader den at ånde. Polyester 44%, Polyamid 36%, Polyurethan 17%, Bomuld 2%, Elastomer 1%. Latexfri.

Vaskeråd: Maskinvask 40°. Luk alle velcrobånd inden vask. Anvend gerne vaskepose. Anvend ikke blegemiddel eller skyllemiddel. Tørres på plant underlag. Må ikke stryges eller tørretumbles.

Måltagning:

1. Omkredsen målt rundt om overarmen proksimalt øverst ved armhulen.
 2. Ønsket længde fra acromion.
- Valg af størrelse afhænger både af overarmens omkreds og længde samt frakturens placering.

Størrelse	1. Omkreds	2. Længde	Art. no.
S	17-23 cm	32,5 cm	20224-00-40
M	23-32 cm	34,5 cm	20224-00-50
L	32-41 cm	36,5 cm	20224-00-60
XL	41-50 cm	38,5 cm	20224-00-70

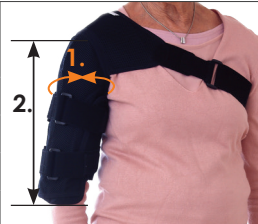


Tilbehør:

-Axilla Kit HC, sort, art.no 20219

Bestilles særskilt, om nødvendigt til individuel tilpasning eller når det er nødvendigt for ekstra indre plade til hygiejne/vask.

Størrelse	Længde	Art.no. Axilla Kit HC:
S	12 cm	20219-00-40
M	14 cm	20219-00-50
L	16 cm	20219-00-60
XL	18 cm	20219-00-70




Reg. design by OHIM: 006260816-0001



MD Class I CE