

Saga - Protese BH

ART.NO 31122

Bøjleløs komfortabel protese-BH i blødt mikrofiber materiale. Faste lommer med plads til protese/vat. Brede og polstret justerbare skulderstropper. Høj udskæring og bred støtte under armhulen giver en god pasform og støtte. Krog og hægte lukning på ryggen, 3x3 rækker.

Størrelse: Saga fås i størrelserne: 75 B-E, 80-105 A-E.

Indikationer: Anvendes efter brystkirurgi, med behov for protese. Proteselomme i begge skåle.

Kontraindikationer: Ingen kendte.

Materiale: Polyamid 85%, Elastan 15%. Latexfri.

Vaskeanvisning: Maskinvask 40°C, kan om nødvendigt vaskes ved højere temperaturer, op til 60°C. Produktet vil holde længere, hvis det vaskes ved lavere temperaturer. Hænges til tørre eller tørres liggende. Må ikke tørretumbles. Luk hæfterne før vask. Hvis der opstår blodpletter, læg i blød eller vask i koldt vand. Brug ikke blegemiddel eller skyllemiddel, da dette kan forringe funktionen af materialet.

Måltagning - sådan måler du din størrelse:

Læs størrelsesguiden nedenfor.

1. Omkredsen måles stramt under brystet = **X**. Rund op til nærmeste femtal (omkreds på 78 cm giver BH størrelse 80).
2. Løs måling fra brystbenet over brystets højeste punkt til midten af ryggraden = **Y**. Gang denne måling med 2 = **Y2**.
3. Forskellen mellem **Y2** og **X** bestemmer skål størrelsen (**Y2 - X = skål størrelse**).



Hysken og hægte lukning i ryggen. Lomme til protese/vat. Brede og justerbare skulderremme. Bred støtte under armhulen.



Størrelses guide:

Omkreds under bust = X								
Omkreds X cm	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97	98-102	103-107
= Størrelse	70	75	80	85	90	95	100	105

Y2-X = Skål størrelse					
Forskelle (cm)	13	15	17	19	21
Skål Størrelse	A	B	C	D	E