

Felicia - Post-op-BH

ART.NO 31151

Bøjleløs BH i blødt mikrofibermateriale. Faste lommer, brede og justerbare skulderstropper. Krog og hægte lukning i ryggen, 3x3 rækker.

Størrelse: Felicia fås i størrelserne: 65 F-G, 70 C-G, 75 C-G, 80 C-G, 85 C-D, 90 C-D.

Indikationer: Anvendes efter forskellige typer brystkirurgi eller som en behagelig BH til daglig brug. Den komfortable og støttende BH holder brystet på plads.

Materiale: Polyamid 95%, Elastan 5%. Latexfri.

Vaskeanvisning: Maskinvask 40 °C, kan om nødvendigt vaskes ved højere temperaturer, op til 60°C. Produktet vil holde længere, hvis det vaskes ved lavere temperaturer. Hænges til tørre eller tørres liggende. Må ikke tørretumbles. Luk hæfter før vask. Hvis der opstår blodpletter, læg i blød eller vask i koldt vand. Brug ikke blegemiddel eller skyllemiddel, da dette kan forringe funktionen af materialet.

Måltagning - sådan måler du din størrelse:

Læs sammen med størrelsguide nedenfor.

1. Stramt omkredsmål under brystet = X. Rund op til nærmeste femtal (omkreds på 78 cm giver BH størrelse 80).
2. Løs måling fra brystbenet over brystets højeste punkt til midten af ryggraden = Y. Gang denne måling med 2 = Y2.
3. Forskellen mellem Y2 og X bestemmer skål størrelsen (Y2 - X = skål størrelse).



Hysken og hægte lukning i ryggen.
Brede og justerbare skulderremme.
Bred støtte under armhulen.



Størrelses guide:

Omkreds under brystet = X					
Omkreds X cm	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92
= Størrelse	70	75	80	85	90
Y2-X = Skål størrelse					
Forskelle (cm)	17	19	21	23	25
Skål størrelse	C	D	E	F	G

