

# D-Ring Thumb Wrist Brace - Håndledsortose m. tommelfinger støtte

ART.NO 40311


Stabil kombineret tommel- og håndledsortose, der er nem at tage på. Lukkes med tre velcro-stropper, der giver stabilitet omkring håndleddet og jævn kompression. To aftagelige radiale tommelfingerskiner medfølger. Ortosen har en forbøjet, formbar og aftagelig volar aluminiumsskinne og to dorsale plastskiner for ekstra stabilitet. Tommelfingerlukningen er justerbar.

- Indikationer:**
- Ledbåndskader af tommelfinger.
  - Akut eller kronisk betændelse i mellemhånd og håndled.
  - Senehindebetændelse i tommel og håndledd.
  - Postoperativ immobilisering.
  - Sekundær behandling efter fraktur af tommelfinger eller basis af tommelfinger.
- Kontraindikationer:**
- Alvorlige forstuvninger.
  - Umiddelbart efter brud.

**Material:** Nylon, Polyester, Bomull, Spandex, Aluminium.

**Vaskeanvisning:** Håndvask anbefales, men produktet kan maskinvaskes ved 40°C hvis nødvendigt. Brug vaskepose. Tørres fladt. Fastgør velcroremmene og fjern skinnen før vask. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel, da dette kan forringe materialets funktion. Ingen renseri. Må ikke stryges eller tørretumbles.

**Mål:** Håndledsmål i cm.

Størrelse	Håndledds-mål i cm	Længde cm	Art.no Venstre	Art.no Højre	
S	13-16	20	40311-10-40	40311-20-40	
M	16-18	20	40311-10-50	40311-20-50	
L	18-20	20	40311-10-60	40311-20-60	
XL	20-23	20	40311-10-70	40311-20-70	



MD Class I CE