

Wrist-Thumb Embrace - Håndledsortose m. tommelfinger støtte

ART.NO 40321

Stabil kombineret tommel- og håndledsortose med skinner. Lukkes ved hjælp af tre velcrostrøpper, der omgiver håndleddet og giver ekstra stabil støtte. To aftagelige radiale tommelfingerskinner medfølger. Ortosen har en forbøjet, formbar og aftagelig volar aluminiumsskinne og to dorsale plastskinner for ekstra stabilitet. Tommelfingergrebet kan justeres ved hjælp af to bånd, der stabiliserer det metacarpophalangeale led og den proximale phalanx.

Indikationer: • Ledbåndsskader i tommelfingeren (forstuvninger)


- Akut eller kronisk betændelse i håndleddet eller leddene i mellemhåndsknoglerne (rhizartrøse)
- Senebetændelse og senehindebetændelse.
- Postoperativ immobilisering.
- Sekundær pleje efter frakturbehandling ved tommelfingeren eller basis af tommelfingeren.

Kontraindikationer: • Alvorlige forstuvninger.
• Umiddelbart efter brud.

Material: Polyester, Spandex, Polyamid, Nylon, Aluminium.

Vaskeanvisning: Håndvask anbefales, men produktet kan maskinvaskes ved 40°C hvis nødvendigt. Brug vaskepose. Tørres fladt. Fastgør velcroremmene og fjern skinnen før vask. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel, da dette kan forringe materialets funktion. Ingen renseri. Må ikke stryges eller tørretumbles.

Mål: Håndledsmål i cm.

Størrelse	Håndleds-mål i cm	Længde cm	Art.no Venstre	Art.no Højre	
S	13-16	20	40321-10-40	40321-20-40	
M	16-18	20	40321-10-50	40321-20-50	
L	18-20	20	40321-10-60	40321-20-60	
XL	20-23	20	40321-10-70	40321-20-70	

