

AtleMage - Rygortose

ART.NO 50105

AtleMage er en semielastisk rygortose, som giver stabil støtte over lænden, samtidig som den løfter og støtter maven. Den er velegnet til personer med kraftigt eller slapt maveparti samt til gravide og efter graviditet. Rygstykket er fremstillet af AirX, et elastisk materiale med god kompression, som er meget behageligt at bære, da det ånder. Materialets sribede struktur bevirker, at ortosen ikke glider og sidder på plads. Forstykket er uelastisk og giver stabil støtte/løft for maven. Formen på forstykket kan justeres i begge sider med velcrolukning til optimal løft/støtte. Ortosen passer derfor også til gravide, da den kan justeres efterhånden, som maven vokser. Elastiske spændebånd fæstnes foran og under maven med velcro og kan justeres for at opnå ønsket støtte over lænden. To løse rygskinner formes individuelt efter ryggens kontur. Farve beige.

Indikationer: Anvendes ved hold i ryggen, iskias samt øvrige normalt forekommende problemer i lænderyggen. For at give ekstra støtte til en kraftig/slapp mave, ved graviditet eller til personer med mindre grad af brok.

Materiale: Polyamid 46%, Polyester 44%, Elastan 5%, Bomuld 4%, Naturgummi latex 2%.

Vaskeanvisninger: Maskinvask 40°. Fjern rygskinnerne og luk alle velcrobånd inden vask, benyt vaskepose. Anvend ikke blegemidler. Stryges ikke. Tørretumbles ikke, tørres fladt.

Måltagning: Hoftemål i cm.

Størrelse	Hoftemål cm	Art.no	Højde midt for	Højde midt bag
S	80-95	50105-08-40	25 cm	26,5 cm
M	95-105	50105-08-50		
L	105-115	50105-08-60		
XL	115-125	50105-08-70		
2XL	125-135	50105-08-80		



Syningen er dækket af øvrig tekstil og kommer ikke i kontakt med huden.

