

# Smidig - Bælte

ART.NO 50247

Formbar bælte, der giver stabil støtte. Let at lukke og justere med håndtag og velcro på forsiden. Velcroen fastgøres til en lang fastgørelsesoverflade, hvilket gør at bæltet er fleksibelt i størrelse/omfangsmål og kan justeres for mere eller mindre støtte.

Glat og luftigt materiale, som føles behageligt og giver huden mulighed for at ånde. Bæltet former sig let og passer til forskellige placeringer over bækkenet, omkring maven, hofte eller brystet. Bæltet er vendbart for, at passe på både højre og venstre side. Fås i sort, højde 20 cm.

**Indikationer:** Stabiliserende bælte til stomi/stomibrok. Forebyggende mod brok. Bælte/fikseringsbånd for mave/torso ved mobilisering efter kirurgi og til komprimering.


**Kontraindikation:** Indeklemt brok.

**Materiale:** 28% Polyester, 20% Spandex, 48% Bomuld, 4% Nylon. Latexfri.

**Vaskeråd:** Maskinvaskes ved 40°C, kan ved behov vaskes ved højere temperaturer, dog maks. 60°C. Produktet holder længere, hvis det vaskes ved lavere temperaturer. Brug vaskepose. Tørres plant. Må ikke tørretumbles. Luk alle velcrobånd før vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe materialet.

**Størrelse/Måltagning:** Mål omkring overkroppen svarende til tilltænkte placering i cm. Tjek måltabellen for at finde rette størrelse.

Størrelse	Mål cm	Art. no.
XS	60-75	50247-00-30
S	70-85	50247-00-40
M	80-100	50247-00-50
L	95-115	50247-00-60
XL	110-125	50247-00-70
2XL	120-135	50247-00-80

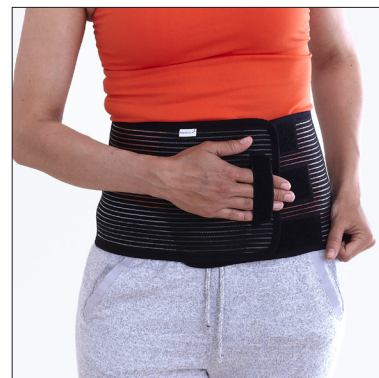

MD Class I CE