

e-STAB - 3-punkts hyperekstensjonskorset

ART.NO 50375

3-punkts korset som anvendes for at begrænse/kontrollere fleksion og lateral mobilitet i den thorakolumbale del af ryggen. e-Stab tilpasser sig forskellige kropstyper, som et skræddersyet produkt, men med færre størrelser. Den nederste stang er teleskopisk justerbar i bredden, kan formes og kan låses i 0°, 18°, 36°. Den øverste stang kan justeres i bredden og kan også indstilles i forskellige vinkler for at opnå den bedste pasform over brystet ved forskellige grader af lordose. Produktet er teleskopisk justerbart i højden. Alle justeringer er mulige uden at skulle fjerne skruerne, blot ved at løsne dem. Rammen er lavet af en letvægts aluminiumslegering med affasede kanter. Polstret er varmelamineret, helt uden sømme eller limning. Polstringen kan justeres ved at skære langs snitlinjerne og fastgøres til ortosen med trykknapper. Polstringen har en vandafvisende overflade. Når ortosen er monteret, kan den nemt tages af og på ved hjælp af sidespændet. Af sikkerhedsmæssige årsager er spændet fjederbelastet i sin låste position.



- Indikationer:**
- Traumatisk brud (T10-L1/L2)
 - Osteoporotiske eller metastatiske relaterede kompressionsfrakturer af thoraxhvirvelsøjlen og dorsolumbar forbindelse (T10-L1/L2)
 - Osteomalaci med brud
 - Dorsolumbar slidgigt
 - Erstatning for gipskorset


Kontraindikationer: Ingen kendte.

Materialer: En letvægtsramme af aluminiumslegering. Plastdele i TPC-ET. Trykspænde i polycarbonat. Polstring i PE-skum. Polyester bælte. Latex fri.

Vaskeanvisning: Rammen tørres af med en blød fugtig klud. Polstring håndvaskes skånsomt ved maks. 30°C.

Mål: Hoftemål i cm.
Højdemål i cm - Mål fra den proksimale del af brystbenet (corpus sterni) til den øverste del af skambenet (tuberculum pubicum).

| Størrelse | Hoftemål i cm (1) | Højde i cm (2) | Art.no |
|-----------|-------------------|----------------|-------------|
| 1 | 50-75 | 41-54 | 50375-00-40 |
| 1 Short | | 30-41 | 50375-50-40 |
| 2 | 75-105 | 41-54 | 50375-00-50 |
| 2 Short | | 30-41 | 50375-50-50 |
| 3 | 105-135 | 41-54 | 50375-00-60 |
| 3 Short | | 30-41 | 50375-50-60 |

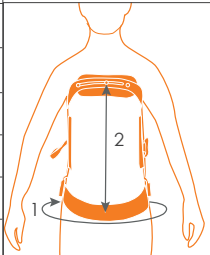


FITS ALL BODY TYPES