

# Viola - Kompressionsbody

ART.NO 51100

Viola er en body med god support over mave og ryg. Det integrerede bælte giver ekstra støtte og kompression over maven. Det gør Viola perfekt til brug efter maveskindsoperation. Viola har lynlås i siden og er let at tage af og på. Bæltet lukkes i siden med hæfter. Viola har aftagelige skulderstropper. Kroege åbning i skridtet.

**Indikationer:** Viola body anbefales efter maveskindsoperation og fedtsugning på mave og/eller ryg, de såkaldte "dansehåndtag". NordiCares kompressionsbody anvendes efter plastkirurgiske indgreb for at opnå det bedst mulige behandlingsresultat. Kompression reducerer risikoen for hævelse og blødning efter operation, giver bedre heling og er desuden smertelindrende.

**Materiale:** 85 % polyamid, 15 % elastan. Latexfri.

**Vaskeanvisning:** Maskinvask ved 40 °C – kan om nødvendigt vaskes ved højere temperaturer, op til 60 °C. Produktet holder længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Skal tørres fladt, ikke tørtumbles. Lynlåsen skal lynes op før vask. Hvis der opstod blodpletter, skal det lægges i blød eller vaskes i koldt vand. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel, da dette kan forringe materialets funktionalitet.


**Måltagning:** Tøjet skal sidde stramt uden at være ubekvemt. Et stykke tid efter operationen, hvor en eventuel hævelse er forsvundet, kan der vælges en mindre størrelse.

**OBS!** Kompressionstøj er designet til at sidde stramt. Optimal kompression og støtte kræver nøjagtig måltagning.

**Talje:** Mål omkredsen, hvor taljen er smallest.

**Hofte:** Stå med begge fødder samlet, og mål omkredsen på det bredeste punkt.

Størrelse	Taljemål cm	Hoffemål cm	Art.no sort
X Small	53-59	79-84	51100-00-30
Small	60-66	85-92	51100-00-40
Medium	67-74	93-100	51100-00-50
Large	75-82	101-108	51100-00-60
X Large	83-89	109-114	51100-00-70
2X Large	90-100	115-122	51100-00-80

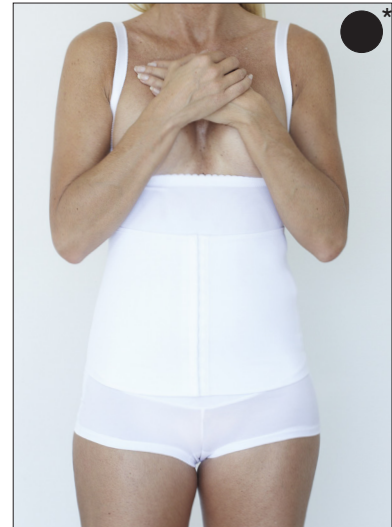

\*Produktet fås i sort, er vist i hvid til klarheden af illustrationen.

Compression  
STRONG

STRONG is the indication of the strongest level of compression for our products. By choosing a smaller or larger size of the garment, the level of compression can be adjusted.

