

Annie - Kompressionsbukser

ART.NO 51202

Halvlange kompressionsbukser i strikket sømløst materiale. Bukser i træk-på model, lukket skridt. Linning med silikonekant for at bukserne sidder bekvemt på plads. Bred kile på indersiden af låret for den bedste komfort og funktion.

Formstrikket, fleksibelt materiale i 4-vejs stretch, der former sig efter kroppen. Aflaster og komprimerer uden at stramme eller føles ubehageligt. Formstrikkede zoner i knæ, balder og lyskeparti samt forstærkning over bug.

Kompressionsgrad svarende til kompressionsklasse I, 15-21 mmHg. Følg måltabel og prøv forsigtigt beklædningen for den bedste pasform og den korrekte kompression.

Indikationer: Anbefales efter mindre kirurgi eller fedtsugning på ben, baller og/eller mave. Beklædningen kan også bruges som et "Trin 2 produkt" efter et større indgreb, når kompression anbefales i længere tid efter operation. Ved kompression forbedres kredsløbet, risikoen for hævelse efter operation mindskes, der opnås bedre ophealing og ligeledes smertelindring.

Materiale: 87% Polyamid, 13% Elastan. Latex-fri.

Vaskeråd: Maskinvask ved 40 °C, kan om nødvendigt vaskes ved højere temperaturer, op til 60 °C. Produktet holder længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Brug vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel. Må ikke tørretumbles.

Måltagning: For bedste pasform og korrekt kompressionsgrad er det vigtigt, at beklædningen vælges omhyggeligt i henhold til måltabellen. Beklædningen skal sidde tæt, men må ikke føles ubehagelig eller stramme.

Talje: Mål omkredsen, hvor taljen er smallest.


Hoffer: Stå med fødderne samlet og mål omkredsen over pubis, hvor hofte/bækken er bredest.

Lår: Omkredsmåling midt på låret.

Størrelse	Taljemått cm	Hoffemått cm	Lårmått cm	Farve	Art.no
X Small	62-68	86-91	46-50	Sort	51202-00-30
Small	69-75	92-97	50-54	Sort	51202-00-40
Medium	76-83	98-103	54-58	Sort	51202-00-50
Large	84-92	104-111	58-62	Sort	51202-00-60
X Large	93-101	112-119	62-66	Sort	51202-00-70
2X Large	102-110	120-127	66-70	Sort	51202-00-80



Silikone kant i taljen.

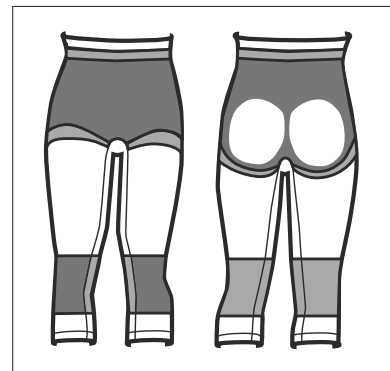

Compression class I



Seamless



4-way stretch

