

# Alison - Kompressionsbody

ART.NO 51203

Kompressionsbody med høj ryg i strikket sømløst materiale. Anbefales efter indgreb på mave, sider og ryg, såsom fedtsugning og/eller kirurgi. Bodyen har hægte og krog lukning i begge sider for nem af- og påtagning og justering af pasform. Åbent skridt giver mulighed for toiletbesøg uden at fjerne beklædningen. Bredt snit i ryggen og justerbare skulderstropper for god kompression over ryggen og langs siderne. Bred kile på indersiden af låret for den bedste komfort og funktion. Formstrikket, fleksibelt materiale i 4-vejs stretch, der former sig efter kroppen. Aflaster og komprimerer uden at stramme eller føles ubehageligt. Formstrikkede zoner ved balder, skulder- og lændeparti samt forstærket strikning over bugen.

**Indikationer:** Kompressionstøj efter plastikkirurgi. Tilsvarende kompressionsklasse 1.

**Kontraindikationer:** Infektion. Arterielle kredsløbsforstyrrelser. Høj risiko for trombose.

**Materiale:** 87% Polyamid, 13% Elastan. Latex-fri.

**Vaskeråd:** Maskinvask ved 40°C, kan om nødvendigt vaskes ved højere temperaturer, op til 60°C. Produktet holder længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Brug vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel. Må ikke tørretumbles.


**Måltagning:** For bedste pasform og korrekt kompressionsgrad er det vigtigt, at beklædningen vælges omhyggeligt i henhold til måltabellen. Beklædningen skal sidde tæt, men må ikke føles ubehagelig eller stramme.

**Talje:** Mål omkredsen, hvor taljen er smallest.



**Hoffer:** Stå med fødderne samlet og mål omkredsen over pubis, hvor hofte/bækken er bredest.

**Lår:** Omkredsmåling midt på låret.

Størrelse	Taljemått cm	Hoffemått cm	Lårmått cm	Art.no Sort	Art.no Beige
XS	62-68	86-91	46-50	51203-00-30	51203-08-30
S	69-75	92-97	50-54	51203-00-40	51203-08-40
M	76-83	98-103	54-58	51203-00-50	51203-08-50
L	84-92	104-111	58-62	51203-00-60	51203-08-60
XL	93-101	112-119	62-66	51203-00-70	51203-08-70
2XL	102-110	120-127	66-70	51203-00-80	51203-08-80

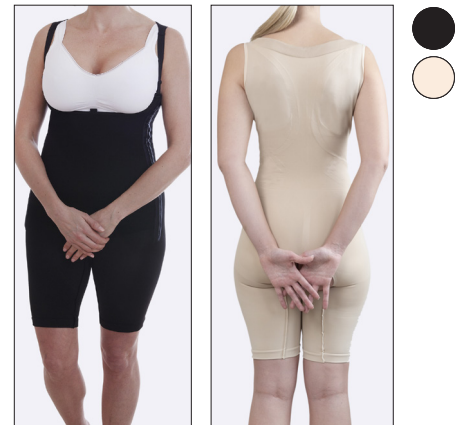

Hægte og krog lukning i begge sider og bredt snit i ryggen.

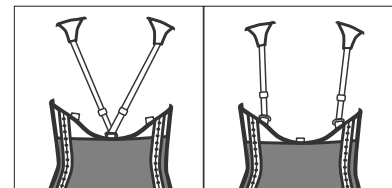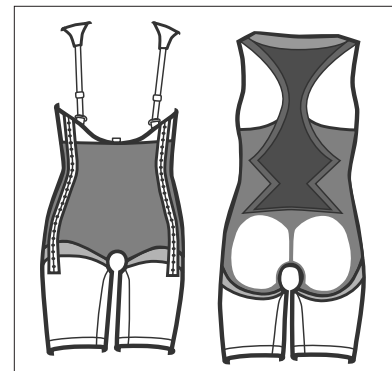

Skulderstropperne kan fastgøres foran eller i siderne.



Adjustable with hook & eye



Seamless



4-way stretch



Compression class I



STANDARD 100

6234-7001 DTI

www.oeko-tex.com



Class I

