

# Daisy - Kompressionsbody

ART.NO 51204

Kompressionsbody i strikket sømløs materiale, dobbelt materiale over bugen. Bodyén kan åbnes helt og let tages på umiddelbart efter operation. Hægte og krog lukning i begge sider for nem på og aftagning og justering af pasform. Skridtet kan åbnes med hægte og krog lukning, hvilket muliggør toiletbesøg uden at fjerne beklædningen. Linning med silikonekant for at bodyén sidder komfortabelt på plads.

Formstrikket, fleksibelt materiale i 4-vejs stretch, der former sig efter kroppen. Aflaster og komprimerer uden at stramme eller føles ubehageligt. Formstrikkede zoner ved balder og rygpart.

Det dobbelte materiale over maven danner en lomme, hvor eventuelt indlæg/skum materiale kan indsættes for at give ekstra tryk.

Kompressionsgrad svarende til kompressionsklasse I, 15-21 mmHg. Følg måltabel og prøv forsigtigt beklædningen for den bedste pasform og den korrekte kompression.

**Indikationer:** Anbefales efter indgreb på maven, såsom fedtsugning eller abdominal kirurgi. Kompression forbedrer blodomløbet og reducerer risikoen for hævelse efter operationen, giver bedre opheling og endda smertelindring.

**Materiale:** 87% Polyamid, 13% Elastan. Latex-fri.

**Vaskeråd:** Maskinvask ved 40 °C, kan om nødvendigt vaskes ved højere temperaturer, op til 60 °C. Produktet holder længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Brug vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel. Må ikke tørretumbles.

**Måltagning:** For bedste pasform og korrekt kompressionsgrad er det vigtigt, at beklædningen vælges omhyggeligt i henhold til måltabellen. Beklædningen skal sidde tæt, men må ikke føles ubehagelig eller stramme.


**Talje:** Mål omkredsen, hvor taljen er smallest.

**Hofte:** Stå med fødderne samlet og mål omkredsen over pubis, hvor hofte/bækken er bredest.

Størrelse	Talje cm	Hofte cm	Farve	Art.no
X Small	62-68	86-91	Svart	51204-00-30
Small	69-75	92-97	Svart	51204-00-40
Medium	76-83	98-103	Svart	51204-00-50
Large	84-92	104-111	Svart	51204-00-60
X Large	93-101	112-119	Svart	51204-00-70
2X Large	102-110	120-127	Svart	51204-00-80



Hægte og krog lukning i begge sider samt i skridtet. Silikone kant i taljen.

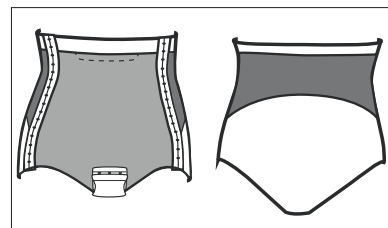

Seamless



4-way stretch



Compression class I



Fully openable & Adjustable

