

# Hollie - Kompressionsbody

ART.NO 51209

Kompressionsbody med høj ryg i strikket sømløst materiale. Anbefales efter indgreb på balder, hofter, mave og ryg, såsom fedtsugning og/eller kirurgi. Bodyen har hægte og krog lukning foran for nem af- og påtagning og justering af pasform. Bred flap på indersiden af låret ret for bedste komfort og funktion. Bodyen har åben skridtdel, der tillader besøg på toilettet uden at tøjet fjernes. Bredt snit i ryggen og justerbare skulderstropper for god kompression over ryg og langs siderne. Formstrikket, fleksibelt materiale i 4-vejs stretch, der former sig efter kroppen. Aflaster og komprimerer uden at stramme eller føles ubehageligt. Formstrikkede zoner ved balder, skulder- og lændeparti samt forstærket strikning over bugen.

**Indikationer:** Kompressionstøj efter plastikkirurgi. Tilsvarende kompressionsklasse 1.

**Kontraindikationer:** Infektion. Arterielle kredsløbsforstyrrelser. Høj risiko for trombose.

**Materiale:** 87% Polyamid, 13% Elastan. Latex-fri.

**Vaskeråd:** Maskinvask ved 40°C, kan om nødvendigt vaskes ved højere temperaturer, op til 60°C. Produktet holder længere, når det vaskes ved lavere temperaturer. Brug vaskepose. Brug ikke blegemiddel, klor eller skyllemiddel. Må ikke tørretumbles.


**Måltagning:** For bedste pasform og korrekt kompressionsgrad er det vigtigt, at beklædningen vælges omhyggeligt i henhold til måltabellen. Beklædningen skal sidde tæt, men må ikke føles ubehagelig eller stramme.

**Talje:** Mål omkredsen, hvor taljen er smallest.

**Hofte:** Stå med fødderne samlet og mål omkredsen over pubis, hvor hofte/bækken er bredest.

**Lår:** Omkredsmåling midt på låret.


Størrelse	Taljemått cm	Hoftemått cm	Lårmått cm	Art.no
XS	62-68	86-91	46-50	51209-00-30
S	69-75	92-97	50-54	51209-00-40
M	76-83	98-103	54-58	51209-00-50
L	84-92	104-111	58-62	51209-00-60
XL	93-101	112-119	62-66	51209-00-70
2XL	102-110	120-127	66-70	51209-00-80

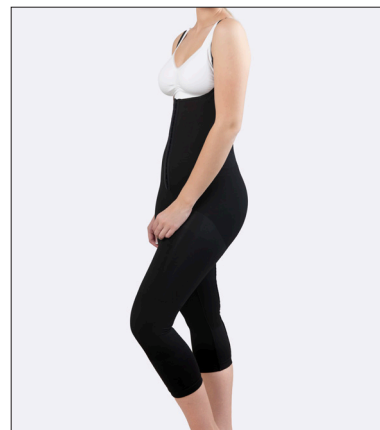

Hægte og krog lukning foran og bredt snit i ryggen.



Skulderstropperne kan fastgøres foran eller i siderne.

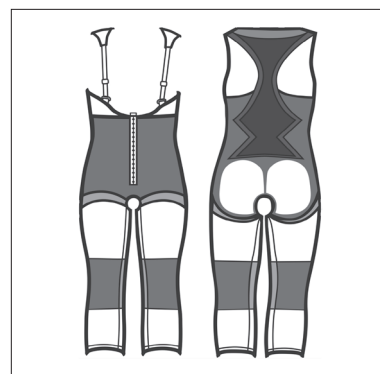

Adjustable with hook & eye



Seamless



4-way stretch



Compression class I



STANDARD  
100  
6234-7001  
DTI  
www.oeko-tex.com

