

# Safehip® AirX - Hoftebeskyttere

ART.NO 60310

Fastsyede skaller

Hoftebeskyttere med fastsyede bløde, tekstile skaller. Skallerne er fremstillet af 100% tekstil, hvilket gør dem åndbare, og buksen er meget kølig at bære. Hesteskoformen virker både stødfordelene og stødabsorberende. Unisex- og herremodel anvendes som normale trusser/underbukser eller som overtræksbukser. Buksen er rundstrikket og meget elastisk. Den er derfor nem at tage på og af og fungerer også udmærket i kombination med større inkontinensbeskyttelse. Modellen Open er åben i skridtet og anbefales ved kraftig inkontinens sammen med tapeble eller inkontinensbukser. Behøver ikke fjernes ved toiletbesøg.




**Indikationer:** Safehip anvendes for at forebygge hoftefraktur hos personer, der har tendens til at falde, lider af knogleskørhed (osteoporose), tidligere har haft hofte- eller andre frakturer, har tendens til svimmelhed eller har gangbesvær. Safehip hoftebeskyttere er veldokumenteret og klinisk testet i flere undersøgelser. Hoftebeskyttere anbefales af Sundhedsstyrelsen til personer med høj risiko for at falde.



**Materiale:** Bomuld 58%, Polyamid 36%, Elastan 6%.

**Vaskeråd:** Safehip AirX kan vaskes mindst 100 gange i temperaturer op til 95°. De kan tørretumbles ved høj temperatur, uden at skallerne tager skade. Ved lavere vaskе/tørretumble-temperatur forlænges levetiden på skaller/bukser. Brug ikke blegemidler med klor. Benyt gerne vaskepose.

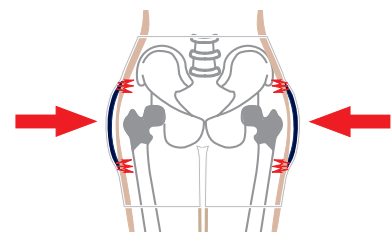

Skallerne sidder korrekt over lårbenhalsen for optimal beskyttelse.

**Måltagning:** Hoffemål i cm tages over det bredeste sted på bagen.



Størrelse	Hoffemål cm	Art.no Safehip AirX Unisex	Art.no Safehip AirX Herr	Art.no Safehip AirX Open
XS	65-85	60310-09-30	60311-39-30	60314-09-30
S	75-95	60310-09-40	60311-39-40	60314-09-40
M	90-110	60310-09-50	60311-39-50	60314-09-50
L	100-120	60310-09-60	60311-39-60	60314-09-60
XL	110-140	60310-09-70	60311-39-70	60314-09-70
2XL	120-150	60310-09-80	60311-39-80	60314-09-80

