

NeoROM - Stabiliserende knæortose

ART.NO 70526

En anatomisk stabiliserende knæortose i wrap model. Ortoosen har skinner med justerbar flexion/extensionsstop, ROM. Justering av skinnerne er lavet med en stift, som derefter fastgøres med plastikdæksel. Extension og flexion kan justeres og låses i 0°, 10°, 20°, 40°, 60° og 90° samt fri bevægelse i flexion. Skinnerne kan let fjernes fra lommerne og omformes for at følge benets kontur. Ortoosen er lavet af neopren, et åndbart blødt materiale med gode stabiliserings- og kompressionsgivende egenskaber. Velcro-lukninger gør ortosen nem at tilpasse og justere. Denne ortose findes i ekstra store størrelser, 2XL-4XL. Ortoosen er 40 cm lang.



Indikationer: Stabilisering af knæled, posttraume og postoperation. Begrænsning af hyperextension.

Størrelse: S-4XL Universel højre/venstre.
2XL-4XL: King-size.

Materiale: Latexfri neopren, polyester, aluminium, nylon.

Vaskeråd: Håndvask max 30°. Tørres plant. Fastgør burre båndet og fjern skinnerne inden vask. Brug ikke blegemiddel, klorin eller skyllemiddel, da det kan forringe materialet. Ikke rens. Må ikke stryges eller tørretumbles.



Måltagning:

1. Omkreds omkring lår cm (ca 15 cm ovenfor mid-patella).
2. Omkreds omkring knæ, over patella.
3. Omkreds omkring mole cm (ca 15 cm nedenfor mid-patella).

MD Class I CE

Størrelse	1. Omkreds lår cm	2. Omkreds mitt-patella cm	3. Omkreds mole cm	Art.no
S	40,5-46	30,5-35,5	28-33	70526-00-40
M	46-48,5	35,5-40,5	33-38	70526-00-50
L	48,5-53,5	40,5-46	38-43	70526-00-60
XL	53,5-58,5	46-51	43-48,5	70526-00-70
2XL	58,5-63,5	51-56	48,5-53,5	70526-00-80
3XL	63,5-68,5	56-61	53,5-56	70526-00-90
4XL	68,5-71	61-66	56-58,5	70526-00-91

King-size

