

# Jura Knee Immobiliser - Immobiliseringsortose

ART.NO 70624

Jura Knæ Immobiliser er en stiv knæortose, der bruges til at immobilisere knæleddet. Jura Knæ Immobiliser har en velcrolukning for hurtig og nem justering. Ortosen består af tre dele, der nemt kan fastgøres med velcro for at passe til forskellige størrelser af benet. Den bageste del har to aluminium skinner, der er forskåret for komfort og pasform. Derudover medfølger to laterale skinner til ekstra støtte. Skinnerne er let aftagelige og formbare. Fæstnes med hjælp af velcrobånd gennem D-ringen foran på midten af skinnen.

**Størrelse:** Fås i fire forskellige længder, universel størrelse, passer til både højre og venstre knæ.

**Indikationer:** Til immobilisering af knæet postoperativt/post traumatisk.

**Kontraindikation:** Dyb venetrombose. Må ikke påføres i direkte kontakt med et åbent sår. Enhver kendt allergi og/eller overfølsomhed over for ethvert materiale, der er anført i produktsammensætningen.

**Material:** 30% Polyuretan, 20% Nylon, 20% Polyester, 20% Aluminium, 9% Polypropen, 1% Acetal. Latexfri.

**Vaskeanvisning:** Håndvask, tørres fladt. Brug ikke blegemiddel eller skyllemiddel. Ingen renseri. Må ikke stryges eller tørretumbles. fastgør velcrostropperne inden vask.

**Måltagning:** Tages proksimalt for patella, siddende med knæet lidt flekteret. I skemaet hedder det størrelse, længde og knæ omkreds.

Størrelse	Længde cm	Omkredsen knæ cm	Art.no
JTI/16	40	28-47	70624-00-40
JTI/20	50		70624-00-50
JTI/24	60		70624-00-60
JTI/28	70		70624-00-70

