

# OActive - Knæortose

ART.NO 70658

OActive er en let og bekvem lavprofilortose, som anvendes til smertelindring og for at lette og forbedre funktionen ved knæartrose. Skinnen har unikke muligheder for at vinkles med den medfølgende nøgle og kan indstilles til en medial eller lateral aflastning. Bevægelsesgraden kan indstilles i 0°, 5°, 10°, 15°, 20° og 25° i ekstension og i 45°, 60°, 75° og 90° i fleksion.

Ortosen har kun en skinne, så kontralateral kontakt undgås. Perfekt til patienter med bilaterale gener og patienter, der har begrænset mellemrum mellem lår eller knæ, når de går.

OActive anvendes lateralt og åbnes/lukkes let med fire klikspænder.

Støbt polstring og polstring på snore med elementer af antiskrid eliminerer risikoen for at ortosen glider.

**Indikationer:** Mild til svær unikompartmental knæosteoartrose. Mediale eller laterale ledkammer.

**Kontraindikation:** Ikke beregnet til personer med vægt >136 kg.

**Størrelse:** Universal

**Materiale:** Skinne i aluminium, knæpude i neopren.

**Vaskeanvisninger:** Bandagen skal aftages og vaskes med koldt vand og et mildt rengøringsmiddel efter behov. Skyl grundigt og lad den lufttørre (ikke i tørretumbler).

	Art. no.
Venstre	70658-10-50
Højre	70658-20-50
Størrelse	Universal
Passer til lår med en omkreds på op til 73 cm.	



MD Class I CE