


Mulighed 1: Dobbelt armslynge

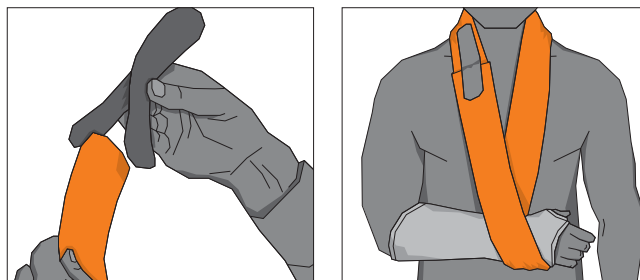

Mulighed 2: Enkelt armslynge

Quicksling Armslynge Arnr 201180050

Instruktion til brugeren

Mulighed 1, dobbelt armslynge

1. Afkortes til den ønskede længde.
2. Fastgør velcro på begge ender af båndet.
3. Lav en løkke til anvendelse i nærheden af albuen.
4. Før slyngen bagom ryggen, tilbage over den modsatte skulder.
5. Før slyngen omkring håndleddet og juster håndstilling ved at fastgøre velcro med slyngen.

Mulighed 2, enkelt armslynge

1. Afkortes til den ønskede længde.
2. Fastgør velcro på den ene ende af båndet.
3. Før slyngen rundt om nakken.
4. Fastgør velcrobåndet.

Indikationer:

Til aflastning af skulder/arm under akut skader/traumer

Materiale:

53% Polyuretan, 38% Polyester, 9% Nylon.
Latexfri.



Dette produkt følger medicinske tekniske direktiv 93/42/EEC. Medicinteknisk produkt klasse 1, ikke steril.



Fremstillet af:
NordicCare AB
Solrosvägen 1
SE 263 62 Viken



NordicCare⁺